

Schemat postępowania w sterylizatorni z narzędziami chirurgicznymi i innym sprzętem medycznym – strona sterylna

sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu

Po zakończonym prawidłowo przebiegającym cyklu sterylizacji pozostaw narzędzia na około 15 minut w otwartym sterylizatorze

Po wyznaczonym czasie wyjmij zestawy narzędziowe ze sterylizatora i powieś w koszach na regałach lub wózkach do wystygnięcia

Wyjmij wskaźniki użyte do kontroli procesu sterylizacji

Sprawdź przebarwienie wskaźników chemicznych, wynik odnotuj w dokumentacji / karta kontroli procesu sterylizacji parowej lub formaldehydowej /

Wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie włóż do inkubatora, inkubuj w temperaturze 56°C przez 3 godziny, odczytaj wynik i zapisz w dokumentacji /karta kontroli procesu sterylizacji parowej lub formaldehydowej /

Jeżeli wszystkie wskaźniki pokazały prawidłowy wynik proces sterylizacji uznaj za prawidłowy

Zapakuj sprzęt w opakowania transportowe odnotuj ilość w zeszycie wydań

Wydadz użytkownikom sprzętu

Użytkownik musi pokwitować w zeszycie wydawania odebrany sprzęt