

Czasy wietrzenia po sterylizacji w tlenku etylenu

Czas kontaktu z pacjentem	Rodzaj materiału	Czas wietrzenia		
		Swobodne przy 10 krotnej wymianie powietrza	W aeratorze	
Poniżej 30 minut		Temperatura 20°C	Temperatura 37°C	Temperatura 55°C
	Tworzywa sztuczne / endoskopy elastyczne/	20 godzin	12 godzin	8 godzin
	Przyrządy optyczne	18 godzin	8 godzin	5 godzin
	Guma	24 godziny	16 godzin	12 godzin
Powyżej 30 minut	Tworzywa sztuczne / endoskopy elastyczne/	7 dni	48 godzin	32 godziny
	Przyrządy optyczne	24 godziny	18 godzin	12 godzin
	Guma	7 dni	4 dni	3 dni
	Implanty	4 tygodnie	3 tygodnie	18 dni

Uwaga temperatura wietrzenia w aeratorze musi być równa temperaturze cyklu sterylizacji. Do aeratora w czasie wietrzenia nie można dokładać nowego materiału.