

Procedura postępowania - Mycie maszynowe kontenerów narzędziowych

MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO – metodę tę należy stosować zgodnie z instrukcją producenta narzędzi i sprzętu.

MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW KONTENERÓW NARZĘDZIOWY

1. Kontener narzędziowy należy poddawać procesom dekontaminacji i konserwacji zgodnie z instrukcją producenta.
2. Przed przystąpieniem do mycia/dezynfekcji kontener narzędziowy należy:
 - Usunąć pokrywę z korpusu kontenera narzędziowego - Uwaga!- obie klamry blokujące pokrywę muszą być otwarte.
 - Z pokrywy kontener narzędziowy należy usunąć uchwyt filtra i filtr – jeżeli je posiada.
 - Usunąć z wnętrza kontener narzędziowy statyw z narzędziami, wszczepami bądź innym sprzętem
 - Usunąć wszystkie jednorazowe plomby, etykiety i inne oznaczenia własne znajdujące się na kontener narzędziowy .
1. Następnie należy przystąpić do mycia i dezynfekcji kontenera narzędziowego - może być myty w myjni- dezynfektorze lub manualnie
 - Do czyszczenia manualnego nie stosować twardych i metalowych szczotek ponieważ może dojść do zniszczenia powierzchni
 - Używać preparatów dedykowanych do czyszczenia kontenerów narzędziowych
 - W myjni – dezynfektorze stosować mycie neutralne
 - Do ostatniego płukania zarówno w myciu maszynowym jak i ręcznym stosować wodę zdemineralizowaną.