



PROCEDURA PRZYGOTOWANIA ZAŁADUNKU KOMORY STERYLIZATORA PAROWEGO

Urządzenie powinno być wykorzystywane zgodnie z instrukcją obsługi producenta sterylizatora.

1. Sterylizatory mogą być obsługiwane jedynie przez osoby przeszkolone z uprawnieniami do obsługi urządzeń ciśnieniowych, które ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie gwarantują odpowiedni nadzór i obsługę urządzenia.
2. Każdy sterylizator poddawać zabiegom czyszczącym i konserwującym zgodnie z zaleceniem producenta.
3. Wykonaj segregację pakietów przeznaczonych do sterylizacji (w temp. 121°C i w temp. 134°C).
4. Opakowania papierowo – foliowe układać w koszach sterylizacyjnych naprzemiennie zachowując zasadę folia do folii, papier do papieru
5. Nie przepętniać kosza powyżej jego górnego brzegu.
6. Pakiety układać luźno, pionowo, w ten sposób by możliwe było włożenie wyprostowanej dłoni między pakiety lub poziomo – stroną papierową do dołu, aby zapewnić swobodny przepływ pary.
7. Zestawy opakowane na tacach perforowanych układać w odpowiednio dopasowanym koszu wsadowym (do kosza z zestawem nie wkładać narzędzi pojedynczych - możliwość uszkodzenia opakowania).
8. Misy, naczynia, butelki umieszczać dnem do góry.
9. Lekkie pakiety układać na samej górze, aby chronić je przed kondensatem.
10. Opakowania z ciężkim sprzętem umieszczać na dole, ponieważ im cięższy jest sterylizowany sprzęt, tym większa ilość pary wodnej skrapla się podczas sterylizacji.
11. Nie przepętniać komory, przestrzegając maksymalnych wielkości wsadu określonych przez producenta sterylizatora.
12. Sterylizator uruchomić zgodnie z instrukcją obsługi i pod warunkiem, że są spełnione wszystkie wymagania producenta co do właściwego załadunku



Polskie Stowarzyszenie
Sterylizacji Medycznej