



SKŁADANIE ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH

Każdy zestaw składa tylko jedna osoba!!

1. Przed przystąpieniem do składania zestawu zdezynfekować ręce.
2. Przystąpić do sprawdzania zestawów pod względem czystości (pozostałości organiczne) - instrumenty wyczyszczone w niedostatecznym stopniu należy poddać ponownemu procesowi mycia i dezynfekcji.
3. Poddać narzędzia konserwacji i skontrolować ich stan techniczny (uszkodzenia).
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zestawie, bądź uszkodzenia któregoś z narzędzi, zgłosić ten fakt użytkownikowi oraz odnotować na protokole zdawczo- odbiorczym
5. Jeżeli zestaw jest zgodny z wykazem narzędziowym
 - umieścić go na tacy narzędziowej,
 - zapakować w barierę sterylną
 - oznakować zgodnie z wymogami
 - potwierdzić zgodności zestawu
10. Tak przygotowany zestaw przekazać do sterylizacji



Polskie Stowarzyszenie
Sterylizacji Medycznej